

## Cubresillón

TNT PRO



**1.- Referencia sanitaria:** SSL101BD

**2.- Finalidad de uso prevista:** Sábana cubresillón, de un solo uso, destinada a recubrir la superficie de contacto de éste, con el fin de actuar como barrera física que limite la transferencia de agentes infecciosos y contribuya a reducir el riesgo de contaminación cruzada, contribuyendo a proteger al paciente en entornos clínicos y hospitalarios.



- Gama TNT PRO, suavidad y protección reforzada
- Hipoalergénico y libre de látex
- Repelente a fluidos
- Confortable y fácil de colocar
- Reciclable

### 3.- Composición:

| Composición                                                      | *Gramaje            | Guía Eco |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Tejido-No-Tejido 100% polipropileno alta suavidad y antiestático | 45 g/m <sup>2</sup> | ECO      |

\*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

### 4.- Otros componentes

- No hay otros componentes

Cubresillón

TNT PRO



5.- Opciones y complementos



5.1.-Colores

| Código | Color        | Guía Eco |
|--------|--------------|----------|
| BL     | Blanco       | ECO++    |
| AC     | Azul celeste | ECO      |

5.2.-Dimensiones

| Código | *Dimensiones                                             | Guía Eco |
|--------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11     | 40/80 cm ancho x 140 cm largo + 20 cm bolsillo superior  | ECO++    |
| 12     | 50/90 cm ancho x 140 cm largo + 20 cm bolsillo superior  | ECO++    |
| 13     | 60/100 cm ancho x 140 cm largo + 20 cm bolsillo superior | ECO++    |
| 15     | 40/80 cm ancho x 220 cm largo + 20 cm bolsillo superior  | ECO++    |
| 16     | 50/90 cm ancho x 220 cm largo + 20 cm bolsillo superior  | ECO++    |
| 17     | 60/100 cm ancho x 220 cm largo + 20 cm bolsillo superior | ECO++    |

\*Tolerancia ± 3%

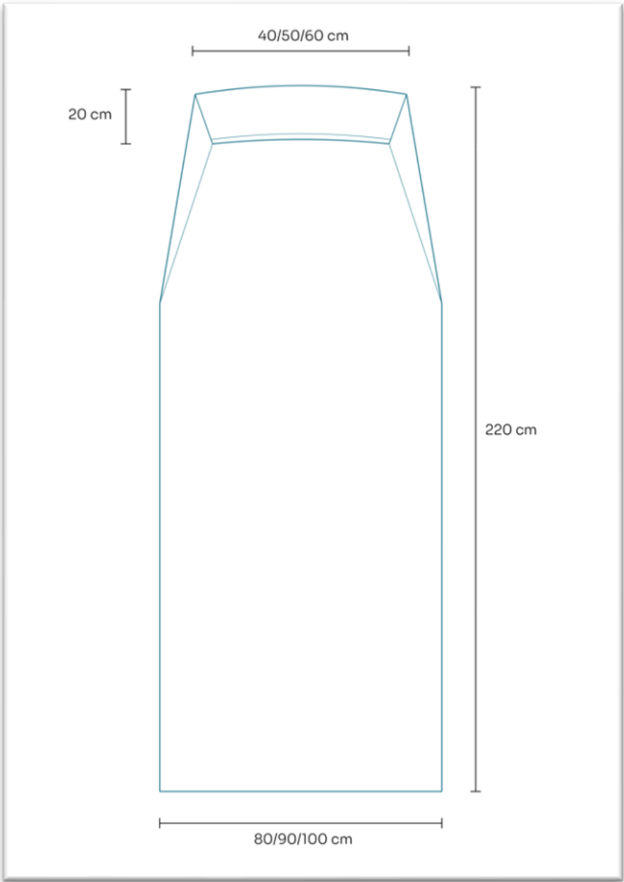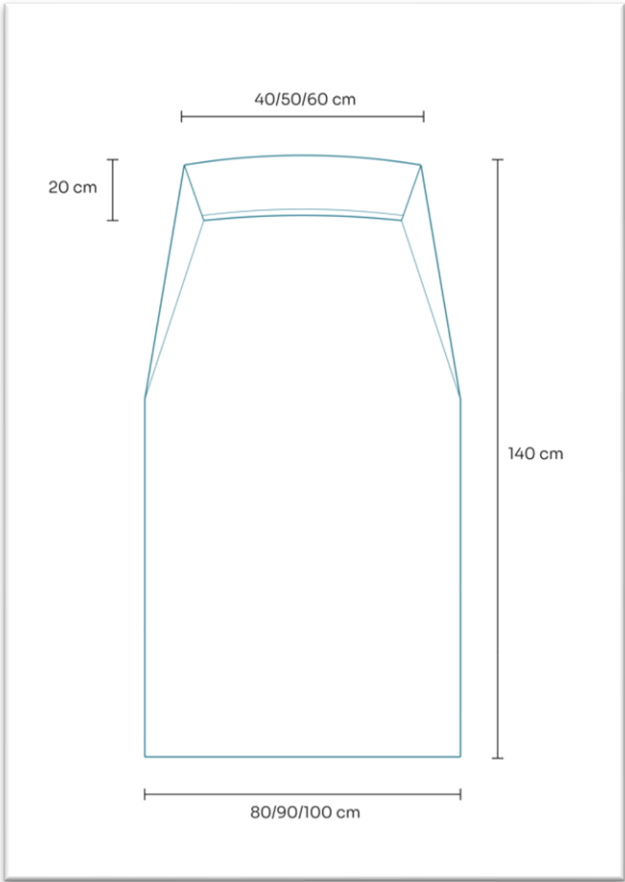

Cubresillón

TNT PRO



| Código | Descripción variante | Guía Eco |
|--------|----------------------|----------|
| 10     | Modelo estándar      |          |


| Código | Dimensiones          | Formato presentación | Contenido caja | Paletizado estándar             | Guía Eco |
|--------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| B1     | 40/80 x 220 + 20 cm  | *Polybag 150 uds.    | *150 uds.      | *2.400 uds. 183 cm altura total |          |
|        | 50/90 x 220 + 20 cm  |                      |                |                                 |          |
|        | 60/100 x 220 + 20 cm |                      |                |                                 |          |
| B2     | 40/80 x 140 + 20 cm  | *Polybag 180 uds.    | *180 uds.      | *2.880 uds. 183 cm altura total |          |
|        | 50/90 x 140 + 20 cm  |                      |                |                                 |          |
|        | 60/100 x 140 + 20 cm |                      |                |                                 |          |

Ecodiseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.  
\*Logística estimada

6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO<sub>2</sub> respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019
- Libre de látex.
- Reciclable

7.- Modelo de etiquetado

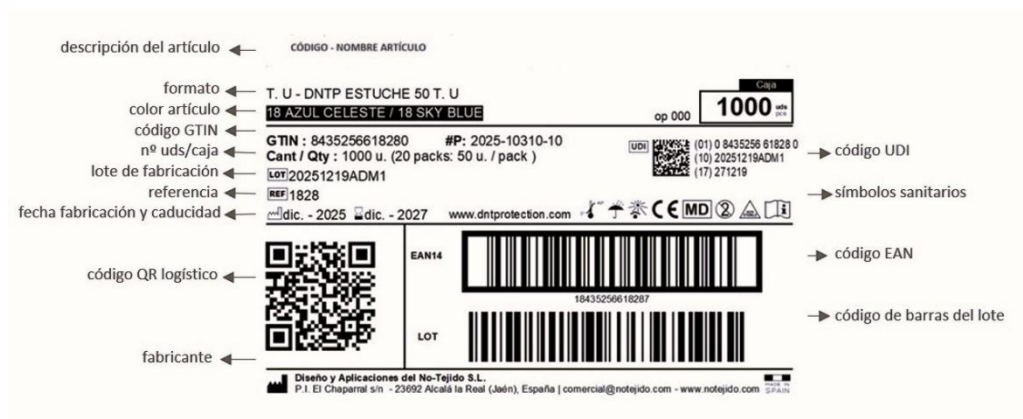

## Cubresillón

TNT PRO



### 8.- Instrucciones de uso y advertencias

#### 8.1.-Instrucciones de uso

- 1.- Dé la vuelta al cubresillón, de forma que las costuras queden hacia dentro
- 2.- Coloque el bolsillo del extremo superior sobre el reposacabezas y despliéguelo, asegurando que toda la superficie del sillón queda correctamente cubierta
- 3.-Producto de un solo uso

#### 8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; [comercial@dntprotection.com](mailto:comercial@dntprotection.com)
- Producto Sanitario Clase I no estéril

### 9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

### 10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.