

Kit paciente

TNT PRO



1.- Referencia Sanitaria: QKT101AA

2.- Finalidad de uso prevista: Kit de artículos de vestuario de un solo uso, destinados a cubrir el cuerpo del paciente y actuar como barrera física que contribuye a reducir el riesgo de contaminación cruzada, al limitar la dispersión de agentes potencialmente infecciosos durante su estancia o la realización de procedimientos en entornos quirúrgicos u hospitalarios.



- Gama TNT PRO, suavidad y protección reforzada.
- Hipoalergénica y libre de látex
- Confortable y transpirable
- Prendas respetuosas con la dignidad del paciente.
- Reciclable

3.- Composición:

Artículo	Composición	*Gramaje	Guía Eco
Gorro	Tejido-No-Tejido 100% polipropileno alta suavidad y antiestático	12 g/m ²	ECO++
Bata paciente		45 g/m ²	ECO++
Slip unisex		40 g/m ²	ECO++
Cubrezapatos		20 g/m ²	ECO++

*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- Elástico: presente en gorro, slip unisex y cubrezapatos.



Kit paciente

TNT PRO



5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Artículo	Guía Eco
10	Blanco	Gorro y cubrezapatos	ECO++
	Azul marino	Slip unisex y bata paciente	ECO

5.2.-Dimensiones

Código	Talla	Guía Eco
A5	L	ECO++
A6	XL	ECO+

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar	ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B1	*Polybag 50 uds	*50 uds	*Pendiente definir	ECO++

Eco-diseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

*Consulte con Dpto. Comercial

6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019
- Libre de látex
- Reciclable




Kit paciente

TNT PRO



7.- Modelo de etiquetado

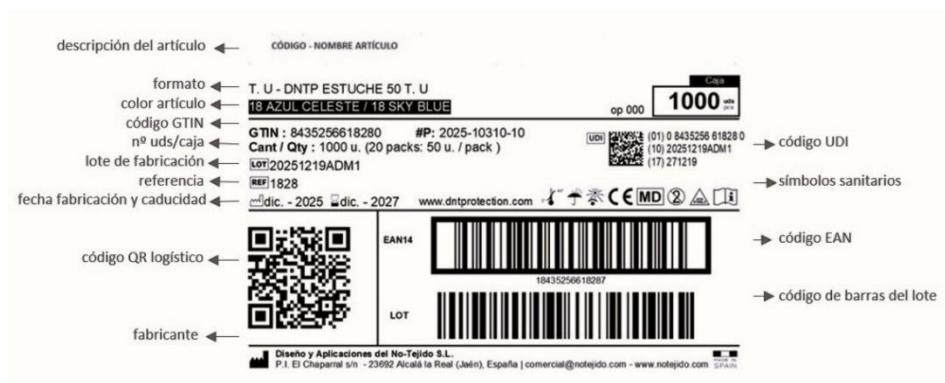

8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- Gorro:
 - 1.-Separe los elásticos para crear una cavidad.
 - 2.-Colóquelo sobre la cabeza de forma que un extremo del sellado quede en la parte frontal y otro en la parte trasera, asegurando que todo el cabello y las orejas quedan cubiertos.
 - 3.-Producto de un solo uso.
- Bata de paciente
 - 1.-Invierta la bata para que las costuras exteriores queden hacia el interior.
 - 2.-Introduzca los brazos a través de las aberturas de forma que las cintas del cuello y de la cintura puedan atarse en la parte posterior del cuerpo.
 - 3.-Producto de un solo uso.
- Slip unisex
 - 1.-Introduzca las piernas por las dos aberturas más pequeñas.
 - 2.-En la cintura, ajuste el elástico a la altura deseada.
 - 3.- Producto de un solo uso.
- Cubrezapatos
 - 1.-Estírelo suavemente por ambos extremos y separe los elásticos para crear una cavidad.
 - 2.- Colóquelo sobre el pie/calzado de forma que un extremo del sellado quede en la parte frontal y otro en la parte trasera, asegurando que todo el pie/ calzado queda cubierto y el elástico situado por encima del empeine.
 - 3.-Producto de un solo uso.

8.2.-Advertencias

- Utilizar solo sobre piel intacta.
- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril



Kit paciente

TNT PRO



9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

