




Estuche mascarilla FFP2 EPI DNTMP3

1.- Referencia: DNTMP3

2.- Finalidad de uso prevista: Media máscara filtrante EPI de Categoría III, que cubre la nariz, boca y mentón, para la protección respiratoria contra partículas, ofreciendo el rendimiento y niveles de protección FFP2. De un solo uso y no reutilizable más de un turno de trabajo.

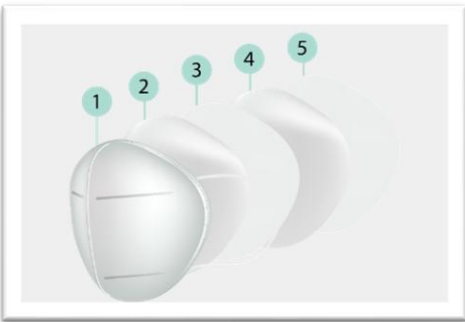

- Certificado bajo la Norma EN 149:2001 + A1:2009 por Organismo Notificado Europeo (nº 2233)
- Valor de filtración $\geq 97\%$
- Hipoalergénica y libre de látex
- Opciones de embalaje sostenibles
- Suave, confortable y transpirable



3.- Composición:

Capas		Composición	Guía Eco
1ª	Exterior	Tejido-No-tejido Spunbond 100% Polipropileno	
2ª	Interna filtrante	Tejido-No-tejido Meltblown 100% Polipropileno	
3ª	Interna	Tejido-No-tejido Spunbond 100% Polipropileno	
4ª	Interna filtrante	Tejido-No-tejido Meltblown 100% Polipropileno	
5ª	Interior	Tejido-No-tejido Spunbond 100% Polipropileno	

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- Tira flexible para ajuste nasal
- Elástico para sujeción a orejas





Estuche mascarilla FFP2 EPI DNTMP3

5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
BL	Blanco	ECO++

5.2.-Dimensiones

Código	Talla	*Dimensiones	Guía Eco
10	U (Única)	11 cm ancho x 15,5 cm alto	ECO++

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar	ECO

5.4.-Empaquetado

Código	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
E1	Flow pack transp. 1 ud./Est. 10 ud	18 Est. (180 uds.)	864 Est. (8.640 uds) 183cm altura total	ECO
E2	Flow pack impreso 1 ud./Est. 10 ud	18 Est. (180 uds.)	864 Est. (8.640 uds) 183cm altura total	ECO
E3	Flow pack transp. 10 ud./Est. 10 ud	96 Est. (960 uds.)	1.536 Est. (15.360 uds) 183cm altura total	ECO+
E4	2 Flow pack transp. 10 ud./Est. 20 ud	48 Est. (960 uds.)	768 Est. (15.360 uds) 183cm altura total	ECO++

Ecodiseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

6.- Certificaciones de calidad

- Media máscara filtrante para proteger contra partículas, fabricada de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 y con la Norma **EN 149:2001 + A1:2009**.
- Clasificación **FFP2** (Filtración de partículas $>94\%$ y Resistencia a la respiración (mbar) <0.7 (en inhalación a 30l/min), <2.4 (en inhalación a 95l/min), <3.0 (en Exhalación a 160l/min).
- Certificado UE de tipo nº **TD11/GT263/263/2103/X1/E/2233** emitido por **Gépteszt** (Organismo Notificado nº 2233)
- Fabricado en España bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, Medio Ambiente ISO 14001:2015, y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido libre de látex y con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019.





Estuche mascarilla FFP2 EPI DNTMP3

7.- Modelo de etiquetado

7.1.-Etiqueta de estuche



7.2.-Etiqueta de lote de estuche



CE 2233 CAT III FFP2 NR Valor de filtración ≥94% MEDIA MÁSCARA FILTRANTE TIPO FFP2 10 UDS UN SOLO USO FABRICADO EN ESPAÑA	Cómo quitarse la mascarilla Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal ni la parte inferior que esté en contacto con la cara, desecharlo en un cubo cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica. SE RECOMIENDA AL USUARIO QUE LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y QUE SIGA LAS INSTRUCCIONES CORRELES. EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN LOS DAÑOS O DETERIORES CAUSADOS POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS EFECTUADAS EN LA MÁSCARA POR PARTE DEL USUARIO.	CE 2233 CAT III FFP2 NR Valor de filtración ≥94% MEDIA MÁSCARA FILTRANTE TIPO FFP2 10 UDS UN SOLO USO FABRICADO EN ESPAÑA	Instrucciones de uso 1. Antes de ponerse una mascarilla, se deben lavar bien las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. 2. Las mascarillas deben sujetarse con la palma de la mano por el exterior para poder pegar la correa en la cara (frente, nariz, mentón) identificando la parte superior. 3. Coloque la mascarilla en su cara y ajuste la pinza nasal. 4. Sujete la mascarilla por el exterior y pase el cordón elástico por detrás de las orejas sin cruzarlo. 5. Baje la parte inferior de la mascarilla hacia el mentón para una correcta colocación. 6. Compruebe que la mascarilla cubra la barbilla. 7. Apriete la pinza nasal para que se ajuste a la nariz.
Limitaciones de uso: • Asegurarse de que la colocación de la mascarilla es correcta. Verifique e inspeccione la mascarilla antes de usar. Tenga en cuenta aspectos como una posible deficiencia de oxígeno. • Es poco probable que se cumplan los requisitos de estanqueidad si, debajo del sello facial, posan los vellores faciales. • No utilizar la media máscara filtrante si la concentración de oxígeno es inferior al 19,5%. • No está permitido el uso del equipo en atmósferas explosivas. • No utilizar la media máscara filtrante en presencia de contaminantes desconocidos, gases o vapores. • Este producto no es resistente a los llamas y no debe utilizarse en áreas con llamas abiertas. • Este producto no debe ser utilizado frente a riesgos distintos a los descritos anteriormente.	DNTMP3 Este producto ha sido fabricado de conformidad con el reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, EN 149:2001 + A1:2009. Dispositivos de protección respiratoria. Medios mascarillas filtrantes para proteger contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con el certificado n° TD11/GT263/263/2103/X1/E/2233 de GÉPTEST Kft. Budapest, Hungría u. 12, 1032, Organismo Notificado No. 2233. Ver Declaración de Conformidad: www.norajido.com/download/DeclaracionConformidadMascarillas.pdf Las mascarillas autofiltrantes han sido diseñadas para retener eficazmente las partículas de polvo en suspensión. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen muy poca resistencia a la respiración. La protección respiratoria generalmente recomendada para el personal que puede estar en contacto a menos de 2 metros con casos en investigación o con casos confirmados es una máscara autofiltrante tipo FFP2.	PRECAUCIÓN: DE UN SOLO USO La media máscara filtrante contra partículas no debe ser utilizada durante más de un turno de trabajo. Almacenamiento Mantener la media máscara alejada de la exposición innecesaria o la luz solar, en lugares secos y protegidos frente a agentes agresivos.	Diseno y Aplicaciones del Nio Tejido S.L. 9-23228635 P.O. Box 1000, 23002 Alcala de Guadalupe, España Tel: (+34) 953 581 682 - comercial@dnprotection.com



Estuche mascarilla FFP2 EPI DNTMP3

7.3.-Etiqueta de caja exterior



8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- Instrucciones de uso:
 - 1.-Antes de ponerse una mascarilla, se deben lavar bien las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica
 - 2.-Las mascarillas deben sujetarse con la palma de la mano por el exterior para poder pegar la concha en la cara (boca, nariz, mentón). Identificar la parte superior
 - 3.-Coloque la mascarilla en su cara y ajuste la pinza nasal
 - 4.-Sujete la mascarilla por el exterior y pase el cordón elástico por detrás de las orejas sin cruzarlo
 - 5.-Baje la parte inferior de la mascarilla hacia el mentón para una correcta colocación
 - 6.-Compruebe que la mascarilla cubra la barbilla
 - 7.-Apriete la pinza nasal para que se ajuste a la nariz
- Limitaciones de uso y advertencias:
 - Asegurarse de que la colocación de la mascarilla es correcta. Verifique e inspeccione la mascarilla antes de usar. Tenga en cuenta aspectos como una posible deficiencia de oxígeno
 - Es poco probable que se cumplan los requisitos de estanqueidad si debajo del sello facial, pasan los vellos faciales
 - No utilizar la media máscara filtrante si la concentración de oxígeno es inferior al 19,5%
 - No está permitido el uso del equipo en atmósferas explosivas
 - No utilizar la media máscara filtrante en presencia de contaminantes desconocidos, gases o vapores
 - Este producto no es resistente a las llamas y no debe utilizarse en áreas con llamas abiertas
 - Este producto no debe ser utilizado frente a riesgos distintos a los descritos anteriormente
- Producto de un solo uso. La media máscara filtrante contra partículas no debe ser utilizada durante más de un turno de trabajo



Estuche mascarilla FFP2 EPI DNTMP3

8.2.-Otras advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Equipo de Protección Individual Clase III, no reutilizable más de un turno de trabajo.

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.